



护理机器人预防性维护保养指南

一、检查电源线、插头、开关


首先检查设备开关是否完好、接头插座有无松动现象；检查插头的接触点有无氧化、生锈或变形；检查电源线有无老化、破损，如有不良请停止使用并联系售后维护。

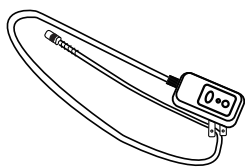

①检查电源线

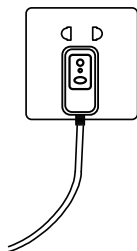

②检查插头

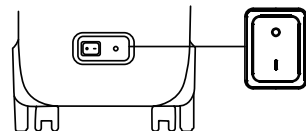

③检查开关


二、机器外观检查

①机器外观是否破损、螺丝零件是否有松动、脱落现象，如有异常需要维护或更换请联系售后；


②可用湿巾擦拭主机表面；

③检查管道两端接头是否有松动、脱落现象，如有需紧固；


④检查工作头胶件是否有破损、如有需更换工作头。

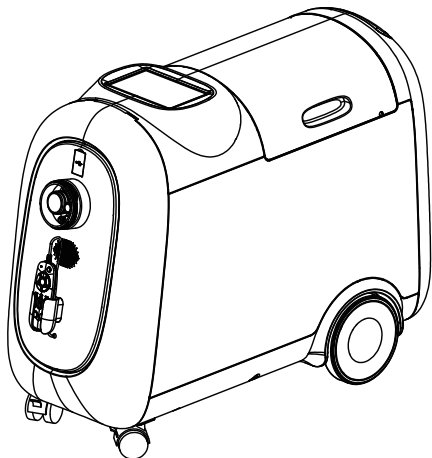


①检查主机外观

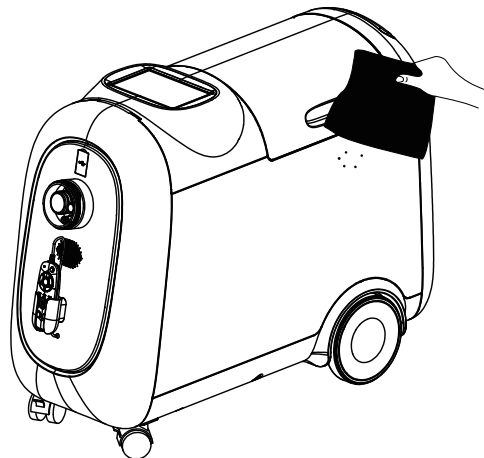

②清洁主机表面

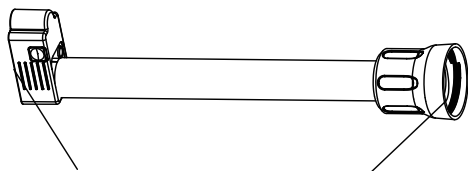


③检查管道两端接头

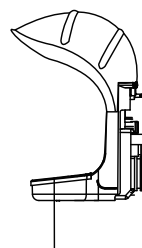

④检查工作头胶件


三、隔热板清洁及过滤网清洁

1、每隔一段时间(一周左右)取出加热水箱隔板,用干净抹布擦拭加热水箱内表面;冲洗加热水箱隔板过滤网和其表面,以清除水苔、杂质等附着污物。

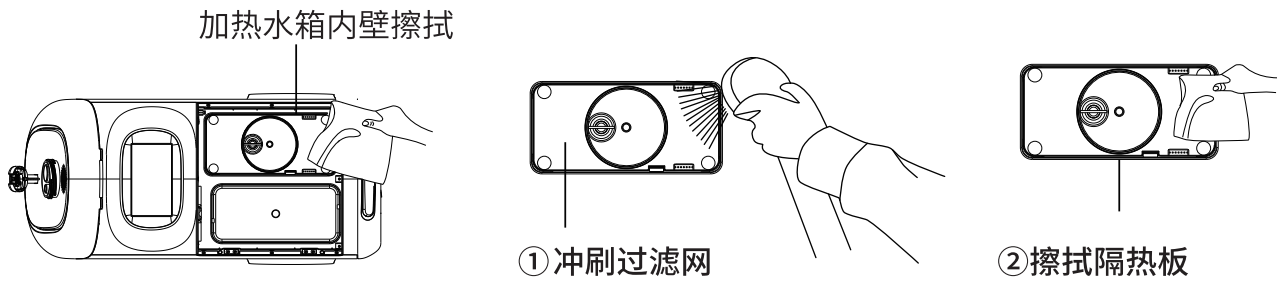


四、污水桶检查

- 1、检查污水桶是否有破损、裂纹、漏水、及变形,如有需更换(图1)
- 2、检查污水桶桶盖的密封圈及圆形旋盖密封圈是否有翘起、变形,如有需更换密封圈(图2)
- 3、定期冲洗污水桶旋盖上的过滤网(图3)

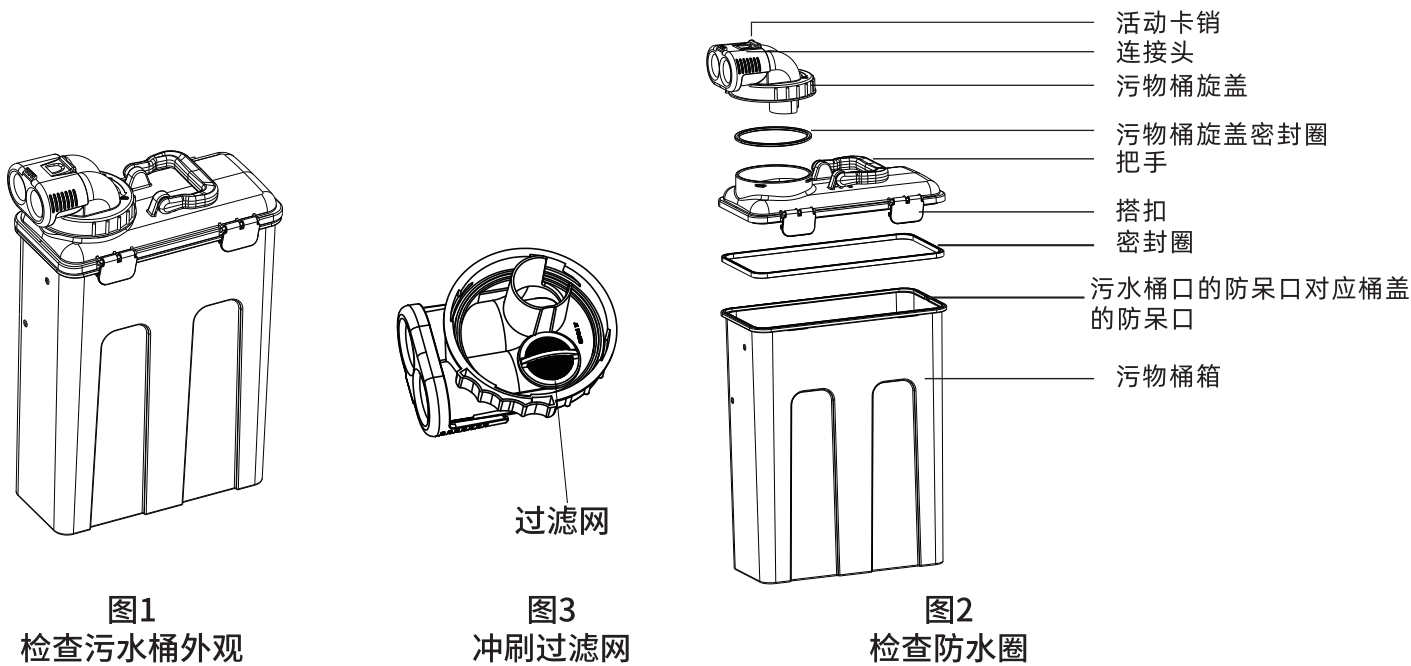


五、清水桶检查

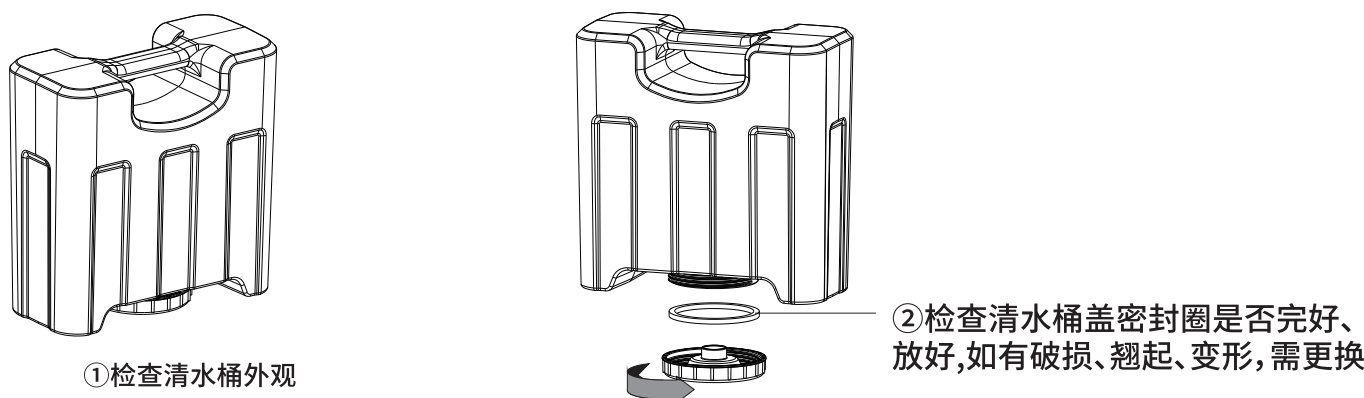


- 1、检查清水桶是否有破损、裂纹、漏水、及变形,如有需更换(图①)
- 2、检查清水桶桶盖的密封圈是否有翘起、变形,如有需更换密封圈(图②)

六、密封圈检查\更换


主机管道接口、管道组件两端接口、工作头带密封圈的管口如遇到接插困难情况下可在密封圈外围涂抹洗洁精或硅油进行润滑;需要常规检查主机管道接口、管道组件两端接口、工作头接口带密封圈、污水桶接触密封圈是否有变形、破损、脱落等现象,如有则需更换不良密封圈

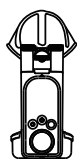


①工作头端

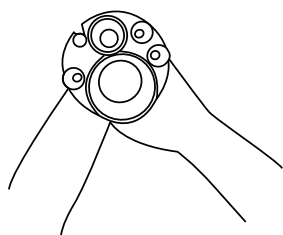

②管道端

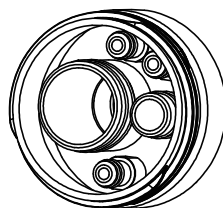


③主机总管接口端

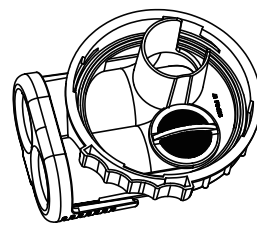

④污水桶接插头端


七、软管组件、工作头、除臭盒建议每6个月更换;UV组件使用1年期限更换

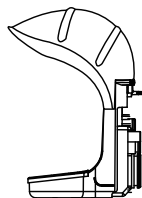


①工作头



②管道

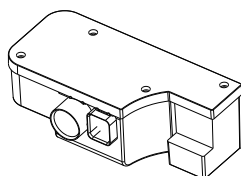

③除臭盒

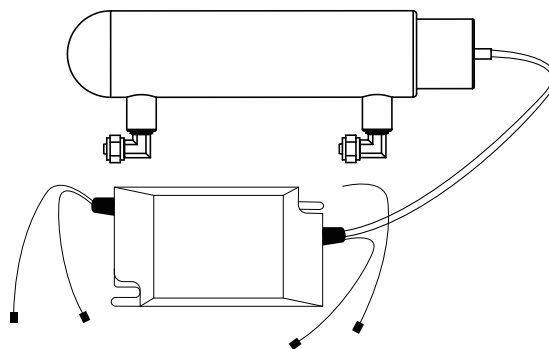




④UV组件

八、功能检查

- 8.1检查遥控器功能及遥控器线是否有破损、老化、如有不良联系售后维护
- 8.2检查屏幕是否有显示异常、破裂等现象、如有不良联系售后维护
- 8.3检查主机后背盖上LED灯是否有显示异常,如有不良联系售后维护

九、安全检查

- 9.1检查漏电保护插头(方法参考图①)
- 9.2检查机器四个轮子是否有脱落、松动、卡顿现象,如有需紧固或维修(图②)
- 8.3检查机器是否有漏水现象,如有漏水,请联系售后维护(图③)

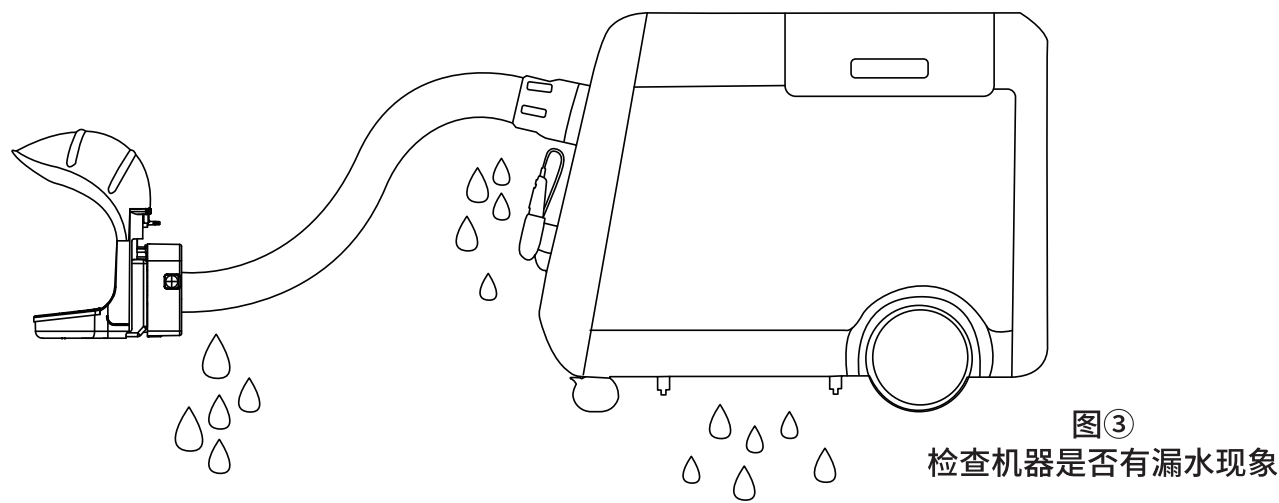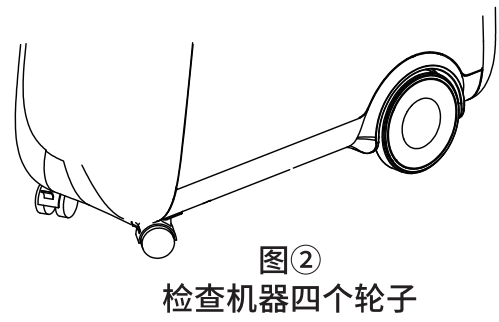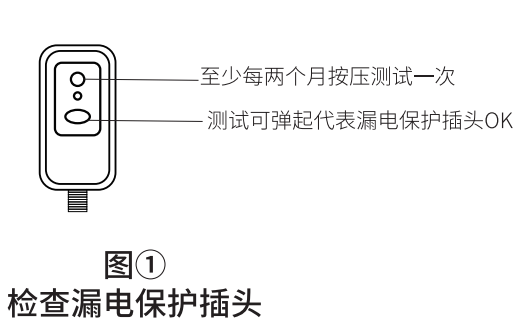

十、产品维修警告



十一、机器停用注意事项

- ①机器长时间不使用时, 请拔下漏电保护插头, 清空净水桶、污物桶, 同时按照排水步骤排空机器内部的清水和过滤器内的水
- ②机器如有超过一个月不使用 请插电开机通电 10 分钟, 确保机子内部电路板性能稳定。
- ③机器停用后用塑胶袋套装好机器放在干燥环境内存放。